


手术技术

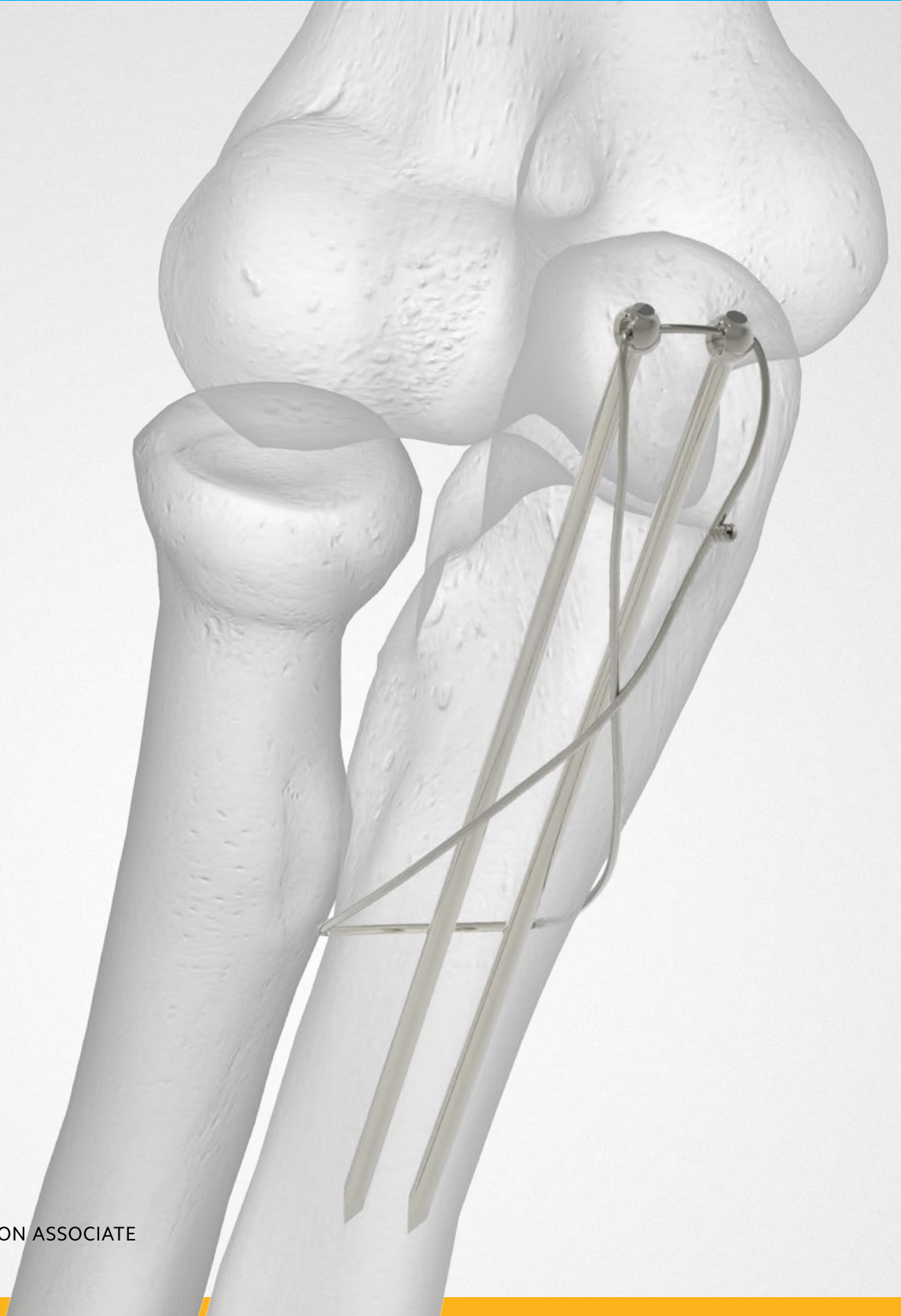

Acumed® 是创新骨科和医疗解决方案的全球领导者。  
我们致力于开发改进患者护理的产品、服务方法和途径。



## Acumed® 张力带别针系统 2

Acumed 张力带别针系统 2 是一种联锁系统，旨在为鹰嘴、髌骨和踝骨骨折提供低切迹、安全的固定方案。

Acumed 张力带别针系统 2 采用简单的方法，旨在最大程度减少别针移位的可能性。在不锈钢别针的近端有一个眼孔。将环扎线穿过眼孔固定别针，这样能帮助在术后延缓别针移位。固定别针的目的是在整个骨折或切骨术点保持压力。

### 适应症

Acumed 张力带别针系统旨在用于处理踝骨、髌骨和鹰嘴骨折的张力带固定程序。

	定义
警告	指出有关患者或用户潜在严重结果的关键信息。
注意	指出为确保正确使用器械而必须遵守的说明。
注	指出需要特别注意的信息。



# 目录

系统特点.....	2
手术概述.....	4
手术技术.....	6
张力带别针系统 2 手术技术.....	6
订购信息.....	8

## 系统特点

### 低切迹

低切迹头的作用旨在最大程度减少软组织刺激

### 稳固锚定

导线穿过别针的眼孔, 该特点有助于骨折复位和稳固, 降低别针移位或脱落的可能



### 应用简单

精准钻孔别针置入。尾部可以用张力带别针折断器或镊子折断

眼孔设计, 旨在稳固锚定和最大程度减少别针移位

50 mm 张力带别针  
(30-0097)


70 mm 张力带别针  
(30-0098)

90 mm 张力带别针  
(30-0099)

1.6 mm

## 系统特点 [续]

### 潜在应用

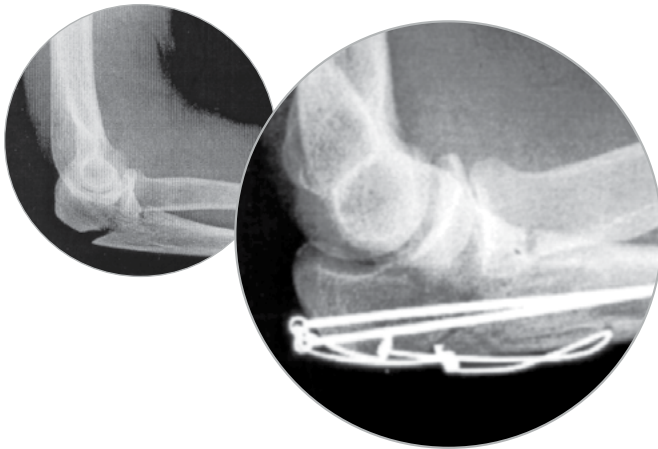


#### 上肢

- ▶ 鹰嘴截骨术
- ▶ 横断性鹰嘴骨折

Acumed 张力带别针系统在 Acumed 肘关节骨板系统中也以未灭菌包装提供。\*提供 70 mm 和 90 mm 的长度，用于鹰嘴部位骨折和鹰嘴截骨术修复。

\*并非所有套装都提供未灭菌张力带别针。

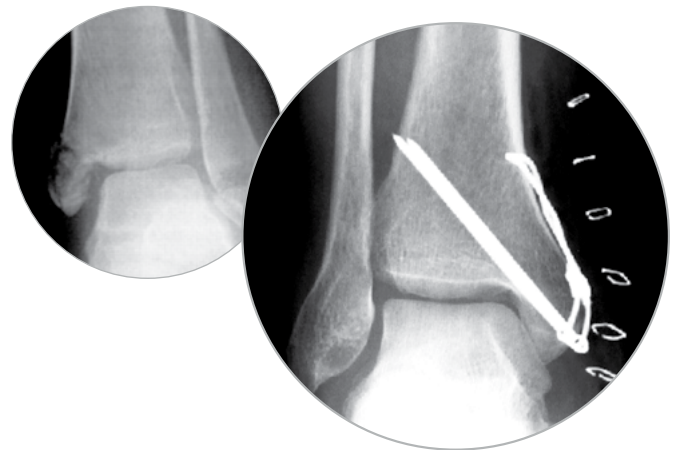

#### 下肢


- ▶ 内踝骨折
- ▶ 外踝骨折
- ▶ 髌骨骨折

提供无菌和未灭菌包装的不锈钢别针




# 手术技术概述

初始别针置入

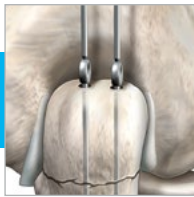


环扎线穿入

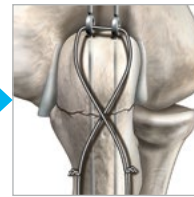


张力带  
别针系统 2  
手术技术

别针头固定

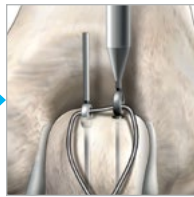

最终紧固和复位

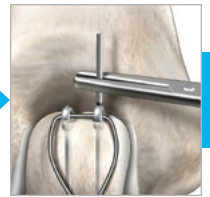



# 张力带别针系统 2 手术技术


图 1



## 1 初始别针置入

使用导针推动工具将所选大小的张力带别针 (30-0XXX) 插入肱三头肌附着点，将别针平行对准凸起 5 mm 的眼孔。

图 2

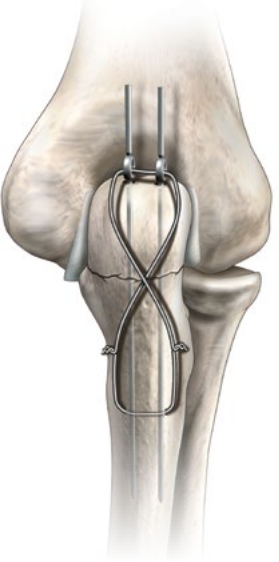

## 2 环扎线穿入

以 8 字法将 16 线规或更小的不锈钢环扎线穿入两个眼孔和骨骼。

**注意：**如果在肱三头肌腱下方穿线，则可能需要将 12 线规针插入肌腱以帮助对齐眼孔和穿线。

**注：**此系统不提供环扎线。



张力带别针  
(30-0XXX)



## 张力带别针系统 2 手术技术 [续]

### 3 别针头固定

使用木槌，配合套装里提供的合适大小的张力带别针折断器（80-0411 或 80-2150）将张力带别针头按入骨骼。

图 3


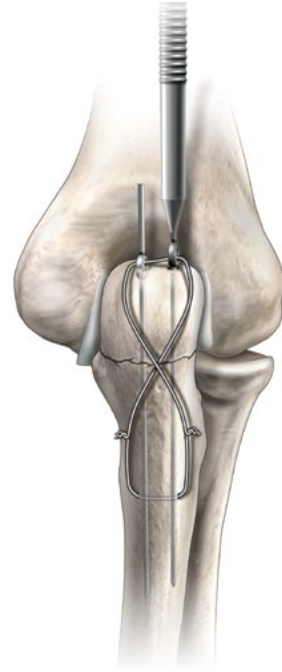


图 4

### 4 最终紧固和复位

将线紧固获得理想的复位后，使用合适大小的张力带别针折断器或镊子折断张力带别针的尾部，并将套管针末端裁到需要的长度。

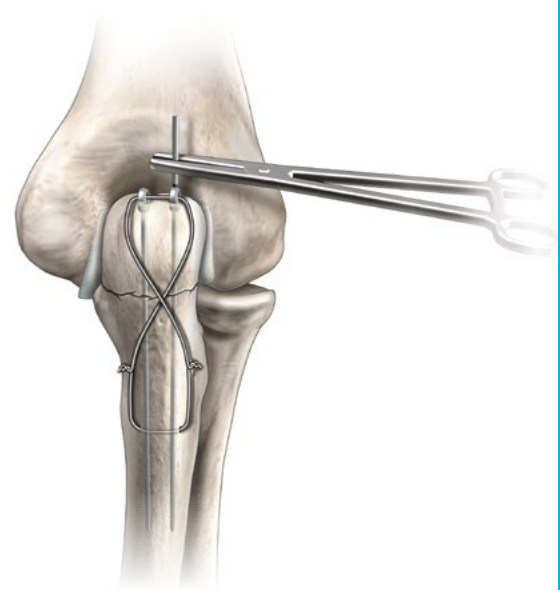

张力带别针折断器  
(80-0411)



2 mm 张力带别针  
折断器  
(80-2150)

## 订购信息

组件	
<b>植入体</b>	
50.0 mm 张力带别针*	30-0097
2 mm x 50 mm 张力带别针	30-0166
70.0 mm 张力带别针*	30-0098
2 mm x 70 mm 张力带别针	30-0167
90.0 mm 张力带别针*	30-0099
2 mm x 90 mm 张力带别针	30-0168
<b>器械</b>	
张力带别针折断器*	80-0411
2 mm 张力带别针折断器	80-2150

无菌组件	
<b>植入体</b>	
50.0 mm 张力带套装*	TB-1550K-S
2 mm x 50 mm 张力带套装	47-0002-S
70.0 mm 张力带套装*	TB-1570K-S
2 mm x 70 mm 张力带套装	47-0002-S
90.0 mm 张力带套装*	TB-1590K-S
2 mm x 90 mm 张力带套装	47-0003-S

\*1.6 mm 直径

欲了解更多 Acumed 创新手术解决方案的全部产品系列，请联系您的授权 Acumed 经销商、拨打 888.627.9957 或访问 [www.acumed.net](http://www.acumed.net)。





Acumed Headquarters  
5885 NW Cornelius Pass Road  
Hillsboro, OR 97124  
办公室电话：+1.888.627.9957  
办公室电话：+1.503.627.9957  
传真：+1.503.520.9618  
[www.acumed.net](http://www.acumed.net)

本材料中某些信息所涉及的产品，可能在某些国家不可用，也可能在不同的国家采用不同的商标名。在不同的国家，这些产品的销售或使用可能会以不同的适应症或限制条件获得政府监管机构的批准或上市许可。这些产品可能并未被批准在所有国家中使用。本材料中包含的任何信息均不应视为对任何产品或以未经读者所在国家的法律法规授权的某种方式使用任何产品的推广或招揽。医生如果对本材料中涉及的产品供货情况及使用方法有具体疑问，应直接咨询具体的授权 Acumed 经销商。患者如果对本材料中涉及的产品使用或针对其自身病症的适用性有具体疑问，应直接咨询他们所就诊的医生。

ZHSPF10-06-B | 生效日期：2017年09月 | © 2017 Acumed® LLC