



Técnica quirúrgica

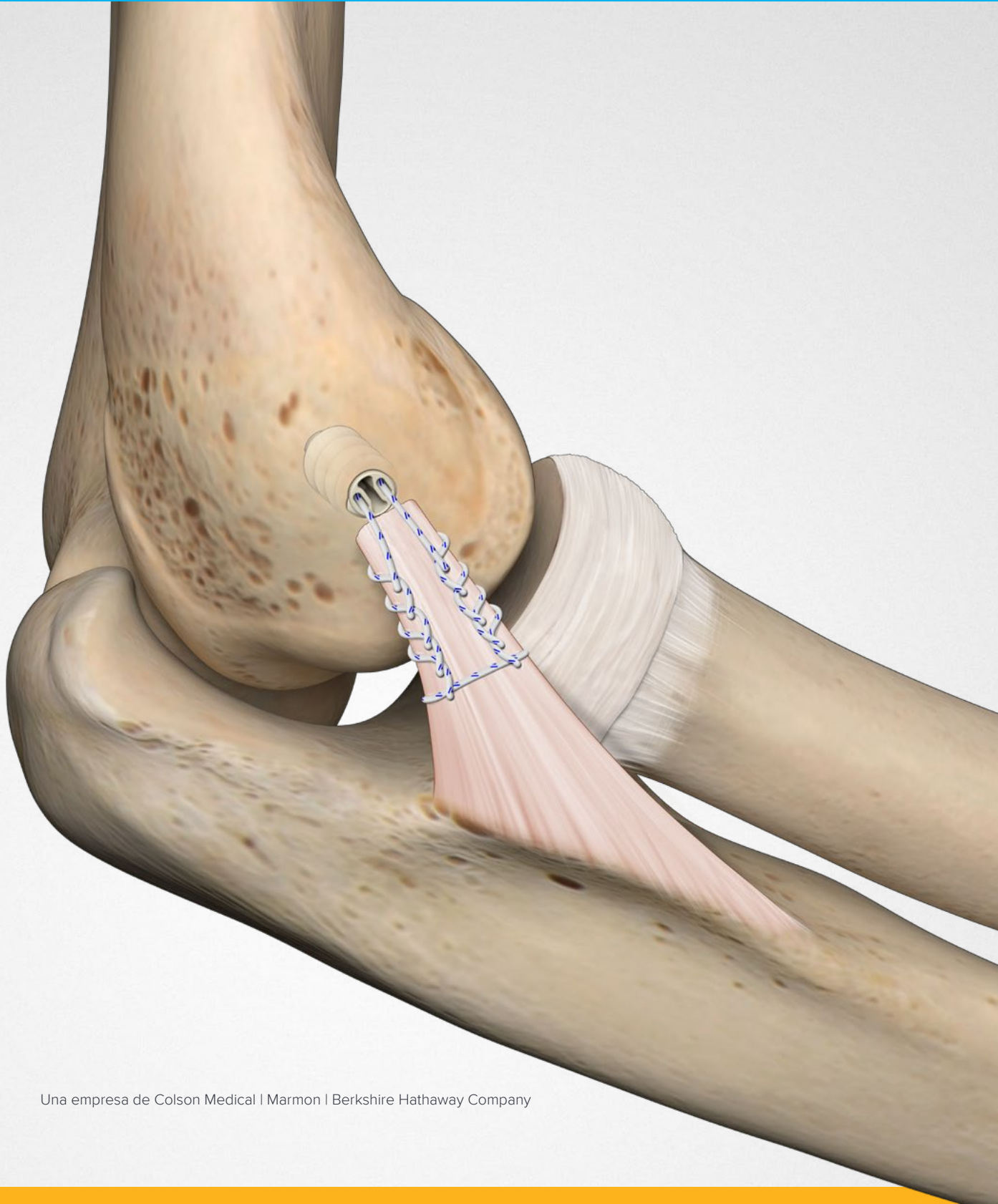

Acumed® es líder mundial en innovadoras soluciones médicas y ortopédicas.



Nos dedicamos a desarrollar productos, métodos de servicio y técnicas que mejoran el cuidado del paciente.

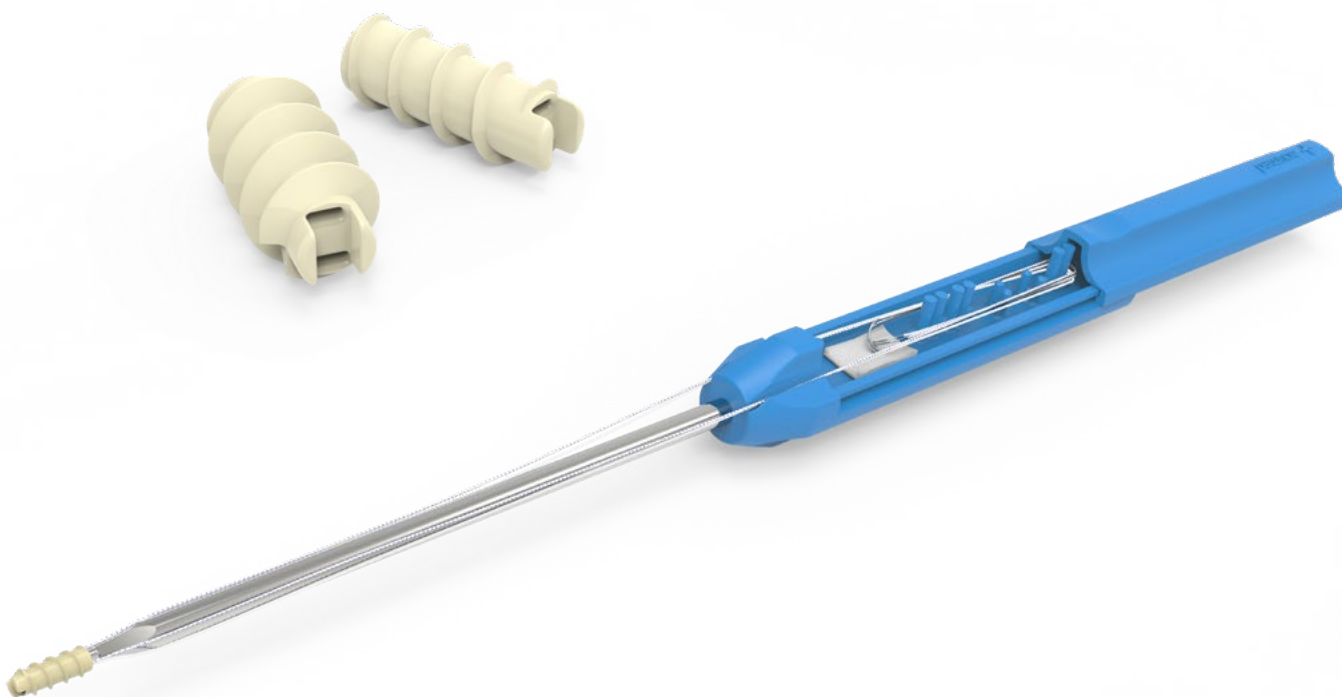

Sistema de anclaje de suturas PEEK de Acumed® 4,5 mm/5,5 mm

El sistema de anclaje de suturas PEEK de Acumed está diseñado para anclar el tejido blando al hueso para su reparación. El sistema está destinado a la fijación de tejidos blandos al hueso en el pie, el tobillo, la mano, la muñeca, el codo y el hombro.


	Definición
Advertencia	Indica información crítica sobre un posible resultado grave para el paciente o el usuario.
Precaución	Indica instrucciones que se deben seguir para garantizar el uso correcto del dispositivo.
Nota	Indica información que requiere atención especial.

Índice

Características del sistema	2
Indicaciones de uso	3
Técnica quirúrgica.....	4
Técnica quirúrgica del sistema de anclaje de suturas PEEK General	4
Información para pedidos	5

Características del sistema

Kits de anclaje

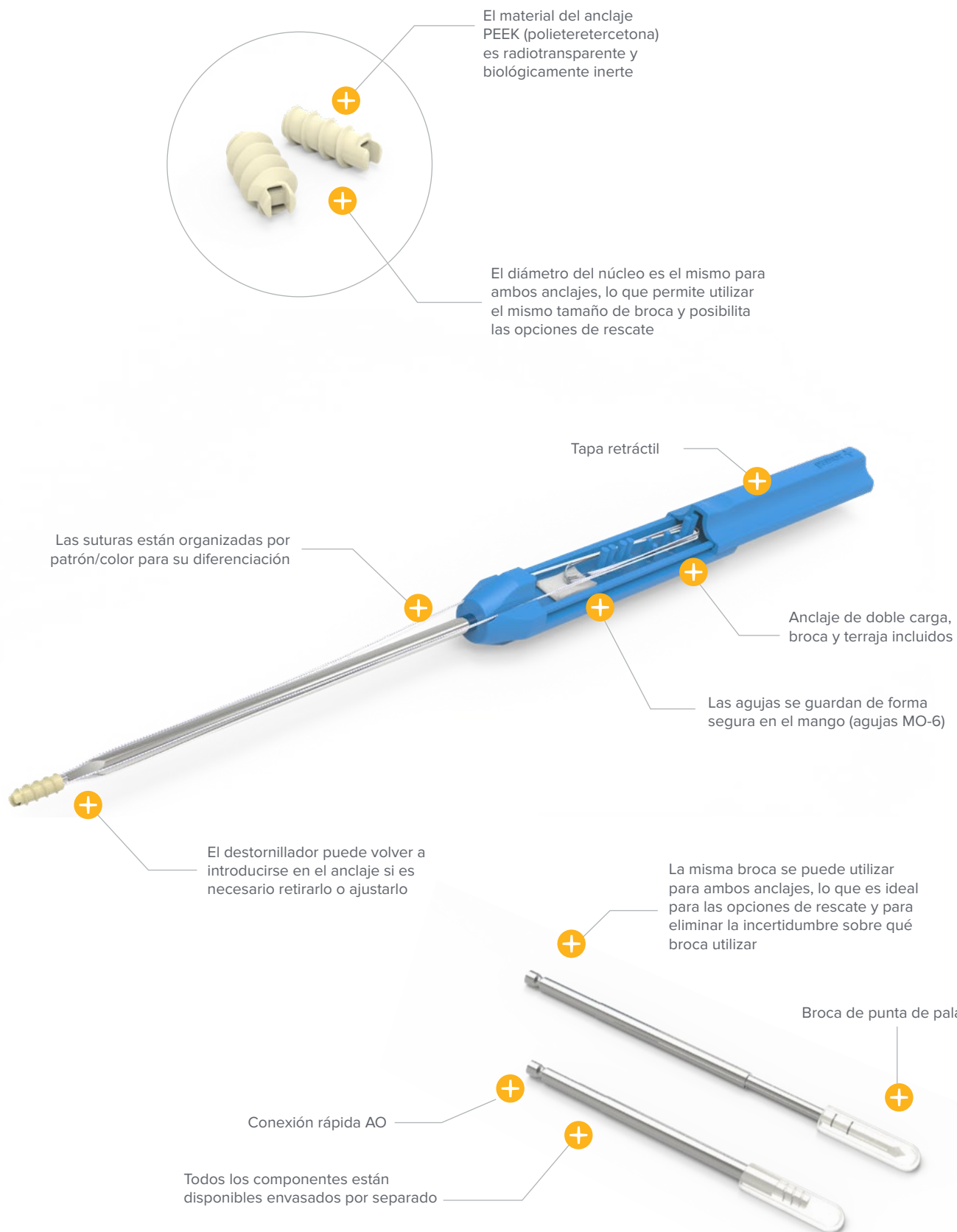


Indicaciones de uso




Codo

- Reparación del bíceps distal y reconstrucción
- Reparación y reconstrucción del ligamento colateral medial (cubital)
- Reparación y reconstrucción del ligamento colateral lateral cubital (radial)
- Reparación del tendón epicondilitis medial/lateral

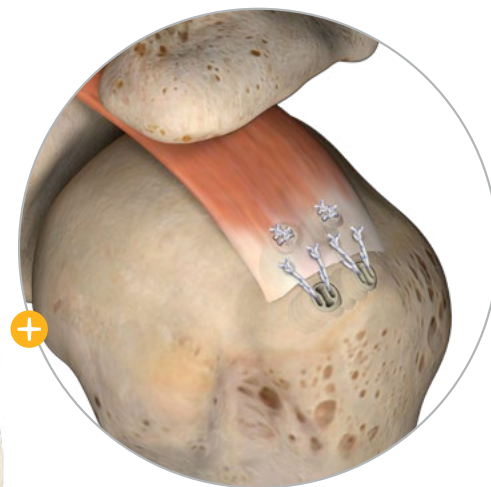

Hombros

- Tenodesis del bíceps
- Reparación del manguito rotador

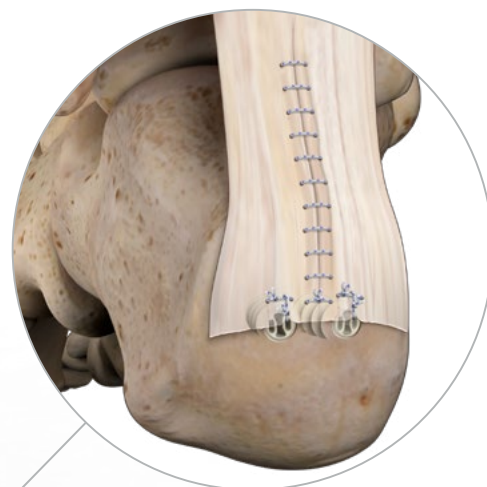

Pie y tobillo

- Estabilización del ligamento lateral del tobillo
- Estabilización del ligamento medial del tobillo
- Reparación del tendón de Aquiles
- Reconstrucción del hallux valgus
- Reconstrucción del mediopié
- Reparación del tendón/reparación del ligamento metatarsiano
- Bunionectomías

Técnica quirúrgica del sistema de anclaje de suturas PEEK

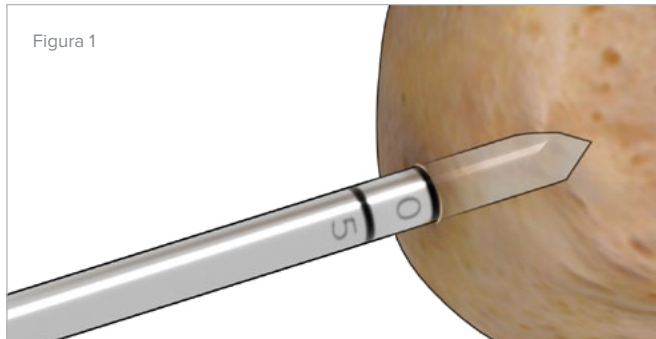


Figura 1

1 Exposición y preparación del hueso

Exponga el hueso en la zona donde se colocará el anclaje. Localice la posición óptima para la reimplantación del tejido y forme un orificio piloto utilizando la broca de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm/5,5 mm (80-3737-S) del kit de anclaje de suturas PEEK (46-0008-S o 46-0009-S). Perfore hasta que la marca láser «0» esté a ras del hueso. Si se desea más profundidad, avance hasta la segunda marca láser «5».

Advertencia: Evalúe y asegúrese de que la calidad de los tejidos blandos sea adecuada antes de la reparación quirúrgica.

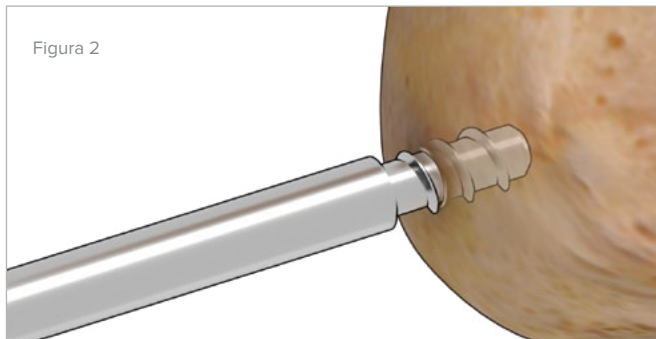


Figura 2

2 Roscado

Utilice la correspondiente terraja para anclaje de suturas PEEK (80-2209-S o 80-2210-S) para el tamaño de anclaje seleccionado y coloque la punta distal en el orificio piloto. Gire la terraja en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga contra la cortical y a ras del borde del hueso. Saque la terraja del hueso girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

Precaución: Para evitar el sobrerroscado, hay que tener cuidado de no aplicar más par de torsión del necesario para asentar la terraja en la superficie del hueso. El orificio perforado debe roscarse manualmente en lugar de hacerlo con un dispositivo eléctrico.

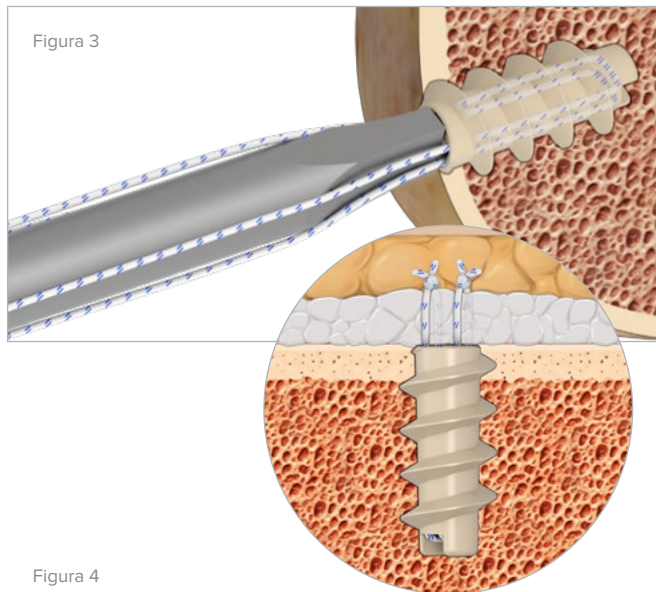


Figura 3

3 Colocación de anclajes y re aproximación con suturas en los tejidos blandos

Retire el destornillador con sutura asentada del kit de anclaje de suturas PEEK (46-0008-S o 46-0009-S) e introduzca la punta del implante en el orificio piloto preparado. Alinee el anclaje de suturas PEEK (46-0012-S o 46-0013-S) a lo largo del eje del orificio de perforación y gire en el sentido de las agujas del reloj mientras aplica una presión mínima hasta que la parte superior del anclaje quede a ras del hueso circundante. Retraiga la tapa del destornillador y libere las suturas y las agujas. A continuación, tire hacia atrás del insertador para desenganchar el anclaje de la punta.

A continuación, se puede suturar el tejido y aplicar tensión al extremo libre para atraer el tejido hacia el anclaje instalado.

Nota: Para la extracción intraoperatoria del implante, vuelva a encajar el destornillador con el anclaje implantado y aplique una ligera fuerza, girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el anclaje se extraiga completamente del hueso.



Broca de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm/5,5 mm (80-3737-S)



Terraja de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm (80-2209-S)



Terraja de anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm (80-2210-S)



Kit de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm (46-0008-S)



Anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm sin broca, terraja (46-0012-S)



Kit de anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm (46-0009-S)



Anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm sin broca, terraja (46-0013-S)

Información para pedidos

Kits de anclaje de suturas PEEK Envasado estéril

Kit de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm	46-0008-S
Kit de anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm	46-0009-S

Nota: Para obtener más información sobre la línea completa de soluciones quirúrgicas Acumed de gran innovación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Acumed, llame al 888.627.9957 o visite www.acumed.net.


Envasados individualmente estériles

Componentes de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm


Anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm sin broca, terraja	46-0012-S
Terraja de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm	80-2209-S
Broca de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm/5,5 mm	80-3737-S

Componentes de anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm


Anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm sin broca, terraja	46-0013-S
Terraja de anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm	80-2210-S
Broca de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm/5,5 mm	80-3737-S

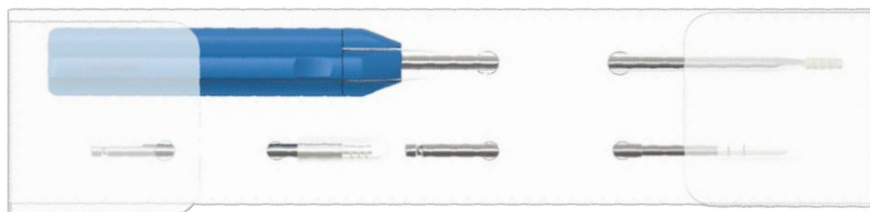


Kit de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm
(46-0008-S)

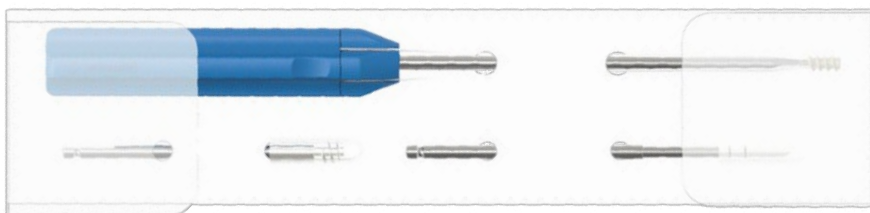


Kit de anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm
(46-0009-S)

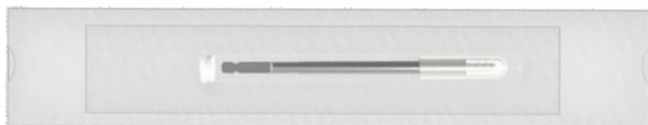

Terraja de anclaje de suturas PEEK de 4,5 mm
(80-2209-S)

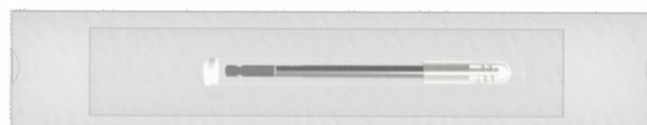

Terraja de anclaje de suturas PEEK de 5,5 mm
(80-2210-S)

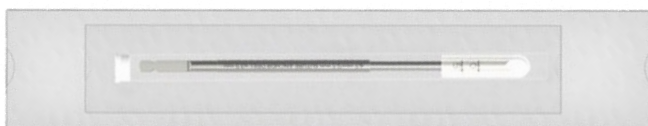

Broca de anclaje de suturas de 4,5 mm/5,5 mm
(80-3737-S)



www.acumed.net

Acumed USA Campus
5885 NE Cornelius Pass Road
Hillsboro, OR 97124
+1.888.627.9957

OsteoMed USA Campus
3885 Arapaho Road
Addison, TX 75001
+1.800.456.7779

Acumed Iberica Campus
C. de Álvaro Caballero, 14,
28023 Madrid, Spain
+34.913.51.63.57

ESTLB00-00-A | Efectivo: 2022/07 | © 2022 Acumed® LLC

Estos materiales contienen información sobre productos que pueden o no estar disponibles en un país en particular o pueden estar disponibles bajo diferentes marcas comerciales en diferentes países. Los productos pueden ser aprobados o autorizados por organizaciones reguladoras gubernamentales para su venta o uso con diferentes indicaciones o restricciones en diferentes países. Los productos quizá no estén aprobados para su uso en todos los países. Nada de lo contenido en estos materiales debe interpretarse como una promoción o solicitud de cualquier producto o para el uso de cualquier producto de una manera particular que no esté autorizada por las leyes y reglamentos del país donde se encuentra el lector. Nada de lo contenido en estos materiales debe interpretarse como una representación o garantía de la eficacia o la calidad de ningún producto, ni de la idoneidad de ningún producto para tratar una enfermedad específica. Los médicos pueden dirigir sus preguntas sobre la disponibilidad y el uso de los productos descritos en este material a su distribuidor autorizado de Acumed. Las preguntas específicas que los pacientes puedan tener sobre el uso de los productos descritos en estos materiales o la idoneidad para sus propias afecciones deben ser dirigidas a su propio médico.

Consulte las instrucciones de uso suministradas para conocer las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso completas.

Acumed® es una marca registrada de Acumed LLC.
OsteoMed LLC es una filial propiedad de Acumed LLC.
OsteoMed® es una marca registrada de OsteoMed LLC.